

【日本製】 らくらく履ける弱圧ハイソックス

ラバラバ2

ハイソックス
つま先なしタイプ

私でも履ける！履き続けられる！履かせやすい！
高齢者の足の「むくみ」に

5月10日
新発売！

お待たせしました！

「ハイソックス」

つま先なし
タイプ

まだまだ「足を使う機会が
多い方の足の浮腫みに」対応できる
ストッキングとして設計しました

【ラバラバ2 の特長】

●足の甲の「むくみ」に特化

足先部分を折り返し使用することで、高齢者の方が特に
むくみやすい足の甲の浮腫みを軽減する設計です。

●履きやすい、そして履かせやすい

縦に伸びないので腕の力が弱い高齢者でも履きやすい。
特殊な繊維を使用しており、弱圧ですがしっかり圧も伝わります。

●肌にやさしい、気持ちいい

肌にあたる部分の凹凸を少なくし、口ゴム部分の「めくれあがり、
折れ曲がり、ずれ下がり」が少ない伸縮設計です。

「ラバラバ2」は、こんな方におすすめします。



足のむくみが辛い方
弾性ストッキングを履きづらい方



入院中や
リハビリ中の患者様



在宅看護や介護施設
などへの入居者様

【商品特長】



ふくらはぎ **8mmHg**

足首 **11mmHg**

足先部 **10mmHg**

- ・ご自身で都合のいい丈に調整して履いて頂くために口ゴム部分の圧をなくして長めにしております。
- ・段階的に弱く、圧がかかる段階的着圧となっており、折り曲げて問題ございません。



足先部分も外側に折り返してご使用ください。

【サイズ表】 ※足首周囲、ふくらはぎ周囲を目安にサイズを選択してください。

	M	L
足首周囲	19.0cm～28.0cm	25.0cm～35.0cm
ふくらはぎ周囲	31.0cm～45.0cm	34.0cm～50.0cm


価格(税込) : 2,200円
 包装入数 : 2枚入(左右1枚ずつ)
 色 : 黒

「ラバラバ2」ポジショニング： 弾性ストッキングと筒状包帯の中間のイメージ



ご利用いただいた方の声

■高齢者の方に履いてもらいました。
 筒状包帯は生地も薄く、ほつれも気になりますが「ラバラバ」は柔らかく傷もつきにくく、食い込みや、ほつれも少なくていいですね。
 <50代・病院勤務 看護師>

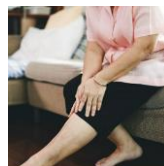

■今回のハイソックスタイプは動いても「めくれり、ずれ下がり」が少ないですね。それとハイソックスなので、介助する側としても着脱の時間も短くていいですね。
 <60代・介護施設勤務>

※この商品に使用している特殊ゴムは検査機関にて【皮膚貼り付け検証】実施済みのゴムを使用しております。 素材：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

※使用上の注意

- サイズのあわないものや2枚重ねでの着用はしないでください。
- 気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛みなどの異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 爪を立てて無理に引っ張ると破れるおそれがあります。着脱の際にはご注意ください。

※お手入れの方法

- 40℃までの「ぬるま湯」での手洗い、もしくは洗濯ネットを使用し、弱い水流で洗濯ください。
- 乾燥機の使用せず、日陰のぬれつき干して乾燥させてください。
- 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。



「ラバラバ2」をもっと知りたい方はこちら

「ラバラバ2 製品紹介 WEBサイト」

<https://www.kyushu-med.jp/lavalava/>



「ラバラバ2」を購入したい方はこちら

「KMSオンラインショップ」

<https://kms-shop.jp>



製造販売元：九州メディカルサービス株式会社

福岡県久留米市螢川町4番地4

資料請求先：東京営業所 ヘルスケア事業部 Tel. 03-3863-8028 / Fax. 03-3863-8029



九州メディカルサービス株式会社ホームページ
<https://www.kyushu-med.jp/>