



ラバラバ2

商品名「ラバラバ」について
2種類の特殊なゴム※（ラバー）を
使用していることから
「ラバラバ」と命名しました。

ひざ上タイプ

私でも履ける！履き続けられる！履かせやすい！ 足のむくみでお悩みのあなたに



「ひざ上 ストッキング」 つま先なしタイプ

「ラバラバ2」は、こんな方におすすめします



足のむくみが
つらくお悩みの方



医療用弾性ストッキング
がうまく履けない方



入院中や
リハビリ中の患者様



在宅看護や介護施設
などへの入居者様

【ラバラバ2 3つの特徴】

● 高齢者の足のむくみに特化

高齢者が悩みがちな、足の甲とひざ裏のむくみに重点的に
対応しました。それぞれに適切な素材を選択し編み込んでいます。



● 履きやすい、そして履かせやすい

履きやすさと圧を両立させ、履き続けることを重視しました。
内側が「すべすべ」で力のない高齢者でも「スルスル」履けます。





● 肌にやさしい、気持ちいい

編み込みにこだわり、脚の部位ごとに編み込みの細かさ
と構造を変え、肌トラブルの原因を取りのぞく構造を実現しました。



※この商品に使用している特殊ゴムは検査機関にて【皮膚貼り付け検証】実施済みのゴムを使用しております。

【商品特長】

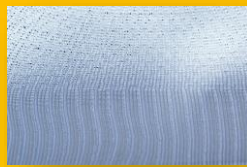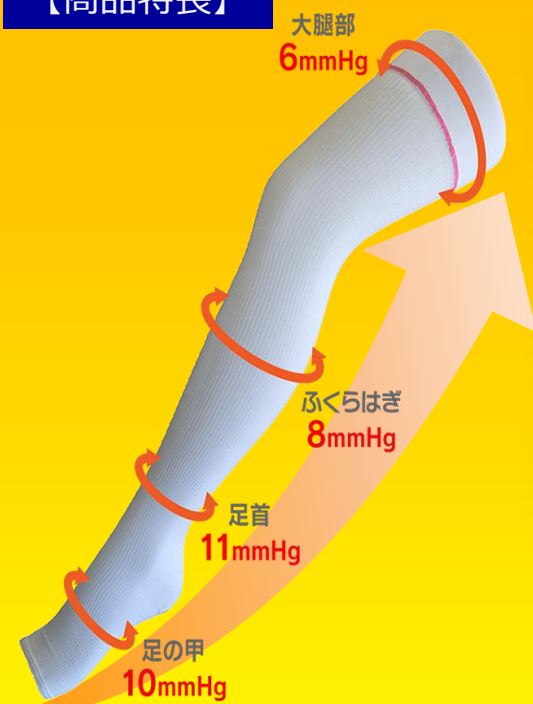

履きやすい、履かせやすい

あえて「縦伸びしにくい」設計とし、ご自身で上部を持って引っ張りながら履きやすいように設計しました。介護者も「履かせやすい」適度な圧迫力となっています。



大腿部が柔らかいので履きやすい

新発売のLサイズは横伸びにより74cmの太ももの方に対応いたします。



足先部分を広く短く柔らかく

足先部分は痛くなりにくい程度の圧迫がかかるようにまた足背の部分は違う生地を採用し、少し圧がかかるよう足の甲のむくみに対応しています。

大腿部が細く、「ずれ下がりやすい」方は・・・
100円SHOPで販売している『ゴムバンド』や『自着性伸縮包帯』をロゴム部分に使用することで「ずれ下がり」を抑えることが出来ます。



【サイズ表】 ※大腿中央部、身長、足首周囲を目安にサイズを選択してください。

包装入数：2枚入（左右1枚ずつ）
色：白色のみ
素材：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

JANコード	サイズ	丈サイズ	大腿中央部	身長	足首周囲	価格(税込)
4589787303369	S	ショート	42.0cm～53.0cm	145.0cm～155.0cm	19.0cm～25.0cm	2,420円
4589787303376	S	ノーマル		155.0cm～165.0cm		
4589787303383	M	ショート	53.0cm～64.0cm	145.0cm～155.0cm	23.0cm～32.0cm	
4589787303390	M	ノーマル		155.0cm～165.0cm		
4589787305158	L	ショート	65.0cm～74.0cm	145.0cm～155.0cm	28.0cm～38.0cm	2,750円
4589787305165	L	ノーマル		155.0cm～165.0cm		

「ラバラバ2」ポジショニング： 弾性ストッキングと筒状包帯の中間のイメージ



ご利用頂いた方の声

■むくみのある患者様に試着してもらいました。腕の力が弱い方でも自分で引っ張りやすく、「するするっ」と履けました。履かせる側としても履かせやすいですね。生地も柔らかいので履いた感じも良さそうです。
<40代・看護師>

■ベッドにいる時間が長く、運動もできないのでむくみに困ってました。これを履くと足が締まった感じになって気持ちいいですね。おかげさまでむくみも減ってきました。
<60代・女性>



※使用上の注意

- サイズのあわないものや2枚重ねでの着用はしないでください。
- 気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛みなどの異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 爪を立てて無理に引っ張ると破れるおそれがあります。着脱の際にはご注意ください。

※お手入れの方法

- 40℃までの「ぬるま湯」での手洗い、もしくは洗濯ネットを使用して弱い水流で洗濯ください。
- 乾燥機の使用せず、日陰のぬれつき干して乾燥させてください。
- 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。



「ラバラバ2」をもっと知りたい方はこちら

「ラバラバ2 製品紹介 WEBサイト」

<https://www.kyushu-med.jp/lavalava/>



「ラバラバ2」を購入したい方はこちら

「九州メディカルサービス

オンラインショップ」

<https://www.kms-shop.co.jp/>



Amazonでも購入できます

製造販売元： 九州メディカルサービス株式会社

福岡県久留米市螢川町4番地4

資料請求先：東京営業所 ヘルスケア事業部 Tel. 03-3863-8028 / Fax. 03-3863-8029



九州メディカルサービス株式会社ホームページ
<https://www.kyushu-med.jp/>